
















# SommaireFichier patient

Généralités.....	3-1
Affichage patient .....	3-1
Fonctions.....	3-2
 Enregistrement d'un patient (Menu patient).....	3-2
 Désenregistrer un patient (Menu patient) .....	3-2
 Patient précédent .....	3-2
 Patient suivant .....	3-2
 Sauvegarder les données du patient (Menu Patient) .....	3-2
 Création d'un nouveau patient (Menu Patient).....	3-2
 Editer les données du patient (Menu patient).....	3-2
 Annuler les modifications (Menu Patient).....	3-3
 Supprimer le patient (Menu Patient).....	3-3
 Informations complémentaires sur le patient (Menu Patient).....	3-3
 Prise de vue patient.....	3-4
 Lecteur de cartes .....	3-4
Champs additionnels .....	3-4
 Importer un patient.....	3-5
Rechercher un patient.....	3-5
Panorama.....	3-6
Afficher les images.....	3-6
Images vidéo.....	3-6
Images intra-orales .....	3-7
Images extra-orales .....	3-7


# Fichier patient

## Généralités

Le fichier Patient permet de créer, de modifier, de supprimer et de sélectionner des fiches Patient.

La fiche patient contient toutes les données relatives à un patient donné ainsi qu'un panorama des clichés existants pour ce patient.

## Affichage patient

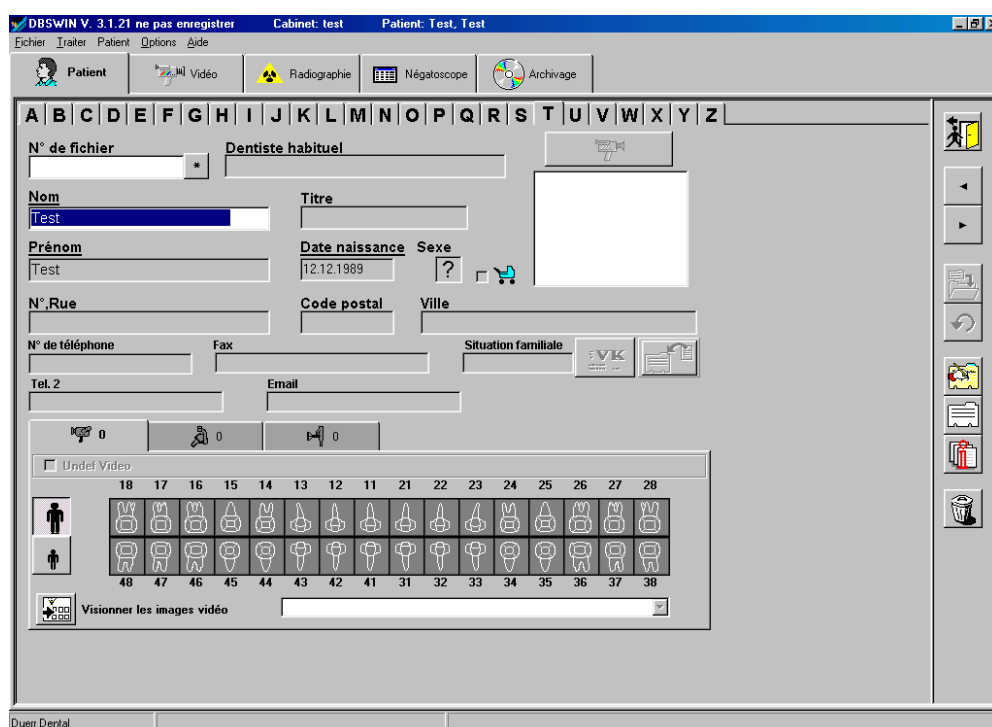

## Fonctions



### Enregistrement d'un patient (Menu patient)

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le patient sélectionné dans DBSWIN et afficher sa fiche dans la ligne d'état. Cet affichage se met à clignoter lorsqu'un autre patient est sélectionné mais pas enregistré. Toutes les fonctions peuvent alors être exécutées pour le patient sélectionné (prise de cliché, visualisation sur le négatoscope, etc.). Ensuite, il suffit simplement de sélectionner à nouveau le patient précédemment enregistré en cliquant sur le bouton clignotant dans la ligne d'état, sans avoir à rechercher le patient.

Cliquez sur le bouton *Enregistrer/Désenregistrer patient* pour passer au désenregistrement du patient.

Si vous sélectionnez et enregistrez un nouveau patient, celui-ci s'affichera dans la ligne de statut.

Les patients importés d'une base externe seront systématiquement enregistrés.



### Désenregistrer un patient (Menu patient)

Le patient actuellement enregistré sera désenregistré et toutes les zones seront vidées.



### Patient précédent



### Patient suivant




### Sauvegarder les données du patient (Menu Patient)


Sauvegarde des données saisies.




### Création d'un nouveau patient (Menu Patient)

Cliquez sur le symbole  du module Patient pour créer une nouvelle fiche patient.



Remplissez les zones. Pour sauvegarder la fiche patient, appuyer sur le bouton . Les zones Prénom, Nom et Date de naissance sont obligatoires. Les zones obligatoires marquées en rouge ne sont pas remplies correctement.

Vous avez aussi la possibilité d'interrompre ou d'annuler la saisie des données en cliquant sur le symbole .

Si un lecteur de cartes est raccordé à votre PC, introduisez la carte d'assurance maladie dans le lecteur et cliquez sur le symbole  pour saisir les données du patient.



### Editer les données du patient (Menu patient)

Pour modifier des données patient, cliquez sur le symbole . Pour enregistrer les modifications, cliquez sur le symbole .




## Annuler les modifications (Menu Patient)

Quitte le mode d'édition sans sauvegarder les données.



## Supprimer le patient (Menu Patient)



Pour supprimer un patient, sélectionnez-le dans la base de données et cliquez sur le symbole . Le patient choisi est supprimé de la base de données active.


Si des images concernant le patient existent dans la base de données, on vous signale lors de la suppression, que vous ne pouvez pas supprimer ce patient s'il existe des radiographies à conserver ou des clichés archivés. Dans ce cas, le patient est "masqué", c'est-à-dire qu'il n'est plus affiché dans le programme.

Pour pouvoir sélectionner ultérieurement un patient masqué, la case à cocher *Afficher les patients masqués* dans *Configuration/Modules/Patient/Patient* doit être activée. Dans ce cas, les patients masqués seront également affichés dans la liste de recherche (cette liste comprendra alors une colonne supplémentaire : *Masqué*). L'attribut *Masqué* est annulé dès qu'un patient masqué est sélectionné : par la suite, ce patient sera à nouveau affiché normalement !




## Informations complémentaires sur le patient (Menu Patient)

Un clic sur le bouton  vous permet d'afficher des informations complémentaires telles que les allergies ou d'autres remarques concernant le patient et de les enregistrer dans le mode d'édition  ou de les modifier.

Le contenu de la première ligne de texte (a1) est toujours affiché à côté du bouton , lorsque la case *Afficher information complémentaire* est cochée dans *Config/Modules/Patient/Patient/*.

Fenêtre d'information

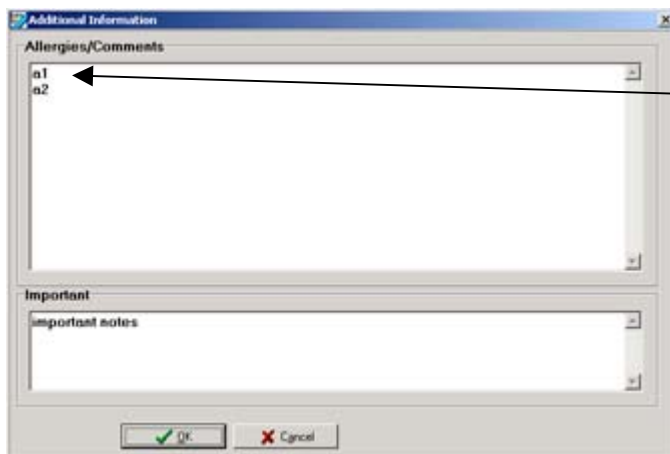




Information  
complémentaire affichée à  
côté du bouton



## Prise de vue patient

La prise de vue n'est possible qu'en mode d'édition.

L'image peut être prise soit directement à l'aide d'une source vidéo  disponible soit lue ou effacée  à partir d'un fichier image  disponible (BMP, JPEG, TIFF)

Pour enregistrer les données, actionnez le bouton d'enregistrement sur la barre des boutons de commande.



## Lecteur de cartes

La carte d'assurance maladie n'est pas utilisée dans tous les pays. Il est donc possible de masquer le bouton de lecteur de cartes et les zones destinées aux données d'assurance maladie. Les **réglages** pour le fichier patient, que vous pouvez effectuer dans le module Configuration, vous offrent cette possibilité.

Le raccordement d'un lecteur de cartes externe à un port série ou l'utilisation d'un clavier de lecteur de carte du type 'Cherry 1501' est possible. Dans tous les cas, le lecteur de cartes adéquat doit faire l'objet d'une configuration. Pour ce faire, ouvrez le module de configuration par l'intermédiaire du menu Options et procédez aux **réglages du lecteur de cartes**.

Les **lecteurs de cartes externes** doivent être configurés pour le dialogue avec le PC et nécessitent un câble de connexion approprié.

Pour le **clavier Cherry**, les pilotes fournis par le fabricant doivent être installés.

Les **claviers de lecteurs de cartes Cherry** comportent aussi un commutateur de sélection de mode qui doit être réglé sur le mode 1. Attention : la commutation n'est active qu'après redémarrage !

Pour de plus amples informations, consultez le manuel du fabricant.

Le lecteur de cartes ne peut pas être utilisé pour modifier les données d'un patient.

### Dans le mode de recherche :

Introduisez la carte d'assurance maladie dans la fente et actionnez le bouton de lecteur de cartes. Si le patient se trouve déjà dans la base de données, il est alors sélectionné.

Si ce n'est pas le cas, le système passe au mode d'édition et les données de la carte sont reportées dans les zones. Vous n'avez plus qu'à actionner le bouton d'enregistrement (bien entendu, le processus peut également être annulé). Le nouveau patient est créé.

### Nouveau patient :

Pour saisir un nouveau patient à l'aide du lecteur de cartes, cliquez sur **Nouveau patient**, introduisez la carte dans la fente puis actionnez le **bouton de lecteur de cartes**. Vous n'avez plus qu'à enregistrer.

## Champs additionnels

Outre les zones de données prédéfinies, vous disposez de quatre champs additionnels que vous pouvez définir librement, par exemple pour entrer le numéro de fax ou l'adresse de courrier électronique du patient.

Le champ additionnel numéro 1 se trouve à côté du numéro de téléphone et les trois autres au-dessus du panorama.

Vous pouvez définir le titre de chaque zone et décider si cette dernière doit apparaître ou non. Ces réglages sont effectués dans les **Propriétés** du fichier patients, auxquelles vous accédez p. ex. en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une zone quelconque de la fiche.




## Importer un patient

Ce bouton vous permet de copier des données relatives à un patient à partir d'autres programmes, p. ex. à partir d'un programme de gestion du cabinet (Réglages dans **Configuration/ Modules/ Patient**).

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, les données sont copiées et, si le patient existe déjà dans DBSWIN, sélectionnées. Si le patient correspondant à ces données n'existe pas encore, le programme passe en mode 'Nouveau patient'.


Si un patient du même nom mais ayant un numéro de fichier différent existe déjà, le programme passe en mode 'Modifier patient'.

Dans chaque cas, il convient de cliquer sur le bouton  pour sauvegarder les modifications dans la base de données.

## Rechercher un patient

Pour rechercher un patient dans la base de données, cliquez sur l'onglet portant l'initiale du nom du patient. Tous les patients dont le nom commence par cette lettre sont affichés dans la fenêtre de recherche. Vous pouvez maintenant parcourir la liste pour choisir le patient souhaité. Si la liste des noms est très longue, entrez d'autres parties du nom dans la zone de texte **Rechercher**. Cliquez sur **Rechercher** pour démarrer la recherche.

Vous avez aussi la possibilité d'entrer le nom recherché dans la zone **Nom** du module Patient ou d'inscrire le nom souhaité dans la zone N° de fichier. Pour démarrer la recherche, appuyez sur la touche **Entrée**.

Si vous cliquez sur l'onglet , tous les patients seront affichés.

**Attention** : le numéro de fichier se compose d'une séquence de 15 caractères maximum, analysés de gauche à droite. Exemple : si vous recherchez la séquence **001T-A0**, vous obtiendrez une liste de résultats **001T-A0\***, l'astérisque \* correspondant à un caractère quelconque.

## Panorama

Au bas de la fiche Patient se trouve la zone de commande 'Panorama', qui permet, outre la visualisation des images disponibles concernant le patient actuel, de transférer rapidement des images de certaines dents ou d'un certain type sur le négatoscope pour les visualiser.


En haut, sur les onglets, sont affichées à côté d'un symbole de type d'images les images existantes correspondant à ce type. La date de la dernière prise de vue de ce type y est affichée au-dessous. Pour sélectionner une fiche, cliquez sur un onglet.

Le nombre d'images indéfinies du type d'images actuel s'affiche à l'écran.


La mise en surbrillance d'une dent indique que des images de cette dent existent.

Le panorama comporte une fiche pour les images vidéo, une pour les images intra-orales et une pour les images extra-orales.

### Afficher les images

Chaque fiche du panorama comporte un bouton  permettant de commuter sur le négatoscope pour afficher dans le presse-papiers images de la boîte de sélection d'image toutes les images de ce type (toutes les images vidéo, toutes les images intra-orales ou toutes les images extra-orales). Le bouton n'est accessible que lorsque des images de ce type existent pour le patient concerné.


Cliquez sur *Radio indéfinie* ou sur *Vidéo indéfinie* pour passer au négatoscope et afficher toutes les images indéfinies pour le type d'image actuel (vidéo, radiographie) dans le presse-papiers images de la boîte de sélection d'image pour sélection. Cette zone n'est activée que s'il existe des clichés du type d'objet pour ce patient.

Par ailleurs, les fiches pour les images vidéo et les images intra-orales comportent chacune un schéma dentaire dans lequel les dents pour lesquelles il existe des images sont mises en surbrillance. Les autres types d'objets images disponibles s'affichent dans une liste déroulante . Cette liste n'est activée que s'il existe des radiographies du patient pour les types d'objets image correspondants.

La fiche pour les images extra-orales présente les images dans trois listes déroulantes.


Un simple clic sur la dent ou sur une entrée de la liste permet de commuter sur le négatoscope et la boîte de sélection d'image affiche dans le presse-papiers images toutes les images correspondant à ce type d'objet image.

### Images vidéo

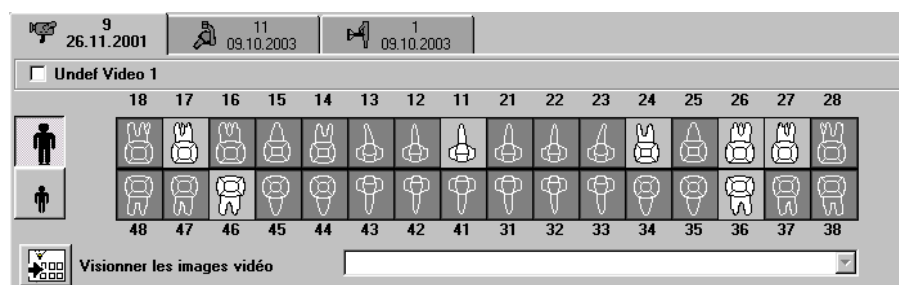


Sur cette fiche, vous voyez un schéma dentaire pour toutes les images dentaires vidéo du patient. Les dents pour lesquelles il existe des images sont mises en surbrillance.

## Images intra-orales

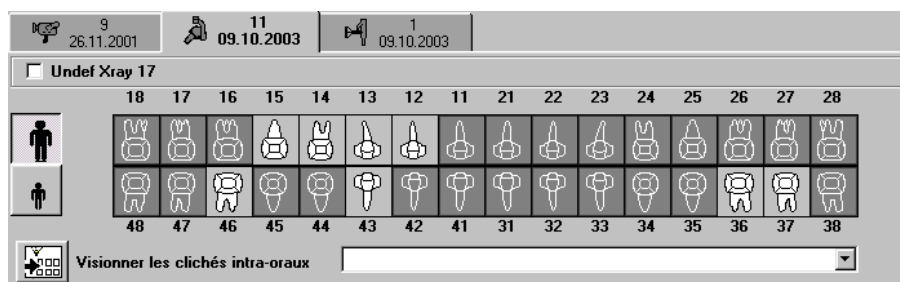

Sur cette fiche, vous voyez un **schéma dentaire** pour toutes les **images dentaires intra-orales** du patient. Les dents pour lesquelles il existe des images sont mises en surbrillance.

## Images extra-orales

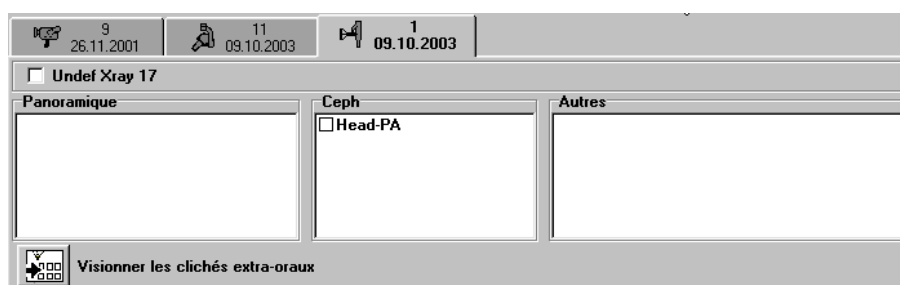

Tous les types d'objets image existants et affectés sont affichés dans trois listes.