



Содержание: Видео


Общие положения	5-1
Просмотр	5-1
Функции	5-2
Неподвижный кадр (меню Видео)	5-2
Прямая съемка (меню Видео)	5-2
Получить снимок (меню Видео)	5-2
Сохранить снимки (меню Видео)	5-2
Сохранить снимки → монтажный стол (меню Видео)	5-2
Редактирование снимка (меню Видео)	5-2
Цветовая адаптация	5-2
Полный кадр (меню Видео)	5-3
Печать (меню Снимок)	5-3
Информация о снимке (меню Снимок)	5-3
Активировать снимок из серии (меню Видео)	5-3
Маркировка снимка для сохранения	5-3
Присвоить снимок	5-3
Управление ножным переключателем	5-4
Управление кнопочными комбинациями	5-4

Видео

Общие положения

В видеомодуле у Вас есть возможность получать снимки, редактировать и сохранять их. Здесь отображается прямая съемка от Вашего источника видеоснимков. Готовые снимки или серии снимков Вы можете передавать для последующего просмотра и редактирования на монтажный стол.



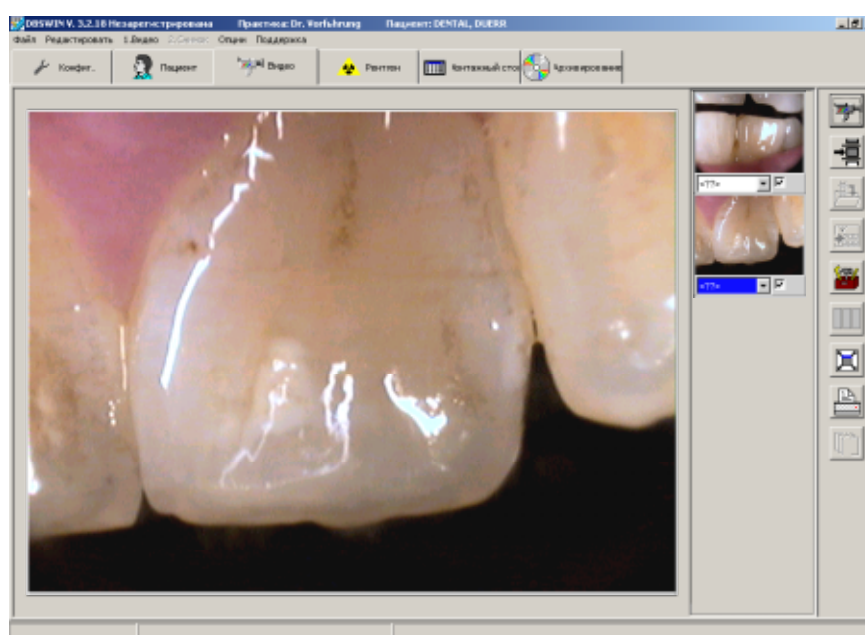


Просмотр



Функции




Неподвижный кадр (меню Видео)

Для получения неподвижного кадра от выбранного источника снимков нажмите, пожалуйста, кнопку . Произойдет захват кадра, и теперь Вы можете либо нажатием кнопки  заложить его в **серию снимков**, либо увеличить до полного кадра , либо распечатать . Нажатием кнопки  Вы возвращаетесь к просмотру прямой съемки.




Прямая съемка (меню Видео)

При просмотре прямой съемки Вы видите прямую картинку от Вашего источника снимков. Кнопкой  Вы можете расширить ее на всю площадь монитора или перейти к режиму просмотра полного кадра.



Получить снимок (меню Видео)

Для получения снимка, показанного на мониторе, нажмите кнопку . Кадр будет помещен справа в серию снимков с уже имеющейся пометкой сохранения ☒. Последующие снимки выполняются аналогично.



Сохранить снимки (меню Видео)

Все снимки, отмеченные ☒, сохраняются в базе данных.

Прежде чем Вы сохраните снимок для непосредственно выбранного пациента, следует убедиться, что правильно присвоен тип объекта (номер зуба или вид снимка).




Сохранить снимки → монтажный стол (меню Видео)

Все снимки, отмеченные ☒, сохраняются в базе данных и передаются для последующего редактирования на монтажный стол. Там они отображаются в хранилище окна выбора.

Прежде чем Вы сохраните снимок для непосредственно выбранного пациента, следует убедиться, что правильно присвоен тип объекта (номер зуба или вид снимка).




Редактирование снимка (меню Видео)

Вы можете продолжить редактирование активного снимка, если активирован (*Контекстный выбор редактирования*) щелчком по кнопке , двойным щелчком в области снимка или щелчком правой кнопкой мыши внутри снимка. Точное описание функций см., пожалуйста, в Руководстве или в оперативной поддержке в главе „Редактирование снимка“.




Цветовая адаптация

Если Вы при просмотре прямой съемки щелкните по кнопке , то откроется окно, в котором Вы можете осуществить цветовую адаптацию и выбор источника для Вашей **карты захвата кадра**. Дополнительные сведения см., пожалуйста, Описание Вашей **карты захвата кадра**.



Полный кадр (меню Видео)

Вы можете представить снимок в главном окне на весь размер экрана монитора, либо щелкнув по кнопке , либо нажав соответствующую педаль ножного переключателя (если он есть!).

Переключение на нормальный просмотр производится либо повторным нажатием ножного переключателя, либо правым щелчком по *Контекстный выбор полного кадра*, либо нажатием любой клавиши.

Этот режим поддерживается не всякой картой! Если Ваше устройство захвата кадра не поддерживает такого режима, все программные элементы удаляются и представлено только окно видеоснимка (без заполнения экрана).




Печать (меню Снимок)

Под этим пунктом меню видеомодуля Вы можете распечатать активированный снимок. Дополнительную информацию см., пожалуйста, в главе "Печать" Руководства или оперативной поддержки.



Информация о снимке (меню Снимок)

Для записи, редактирования и просмотра информации о снимке щелкните по кнопке . Откроется информационное окно к соответствующему снимку.

На закладке *Комментарий* Вы можете вносить текстовую информацию к снимку. При помощи правой кнопки мыши в область текста могут копироваться тексты «горячих» клавиш. **Первый комментарий может быть введен только однажды и не подлежит изменению после его сохранения.**




На закладке *Информация о снимке* указывается тип снимка, размер снимка, тип объекта (например, номер зуба) и область объекта (например, область зуба). Нажатием кнопки *Тип объекта/Выбор* Вы можете выделить, например, номер зуба „главного объекта“ и подтвердить свой выбор *ОК*. При задании области объекта выбранный ранее главный объект отображается на синем фоне, и Вы можете отмечать другие зубы, находящиеся на снимке. Все отмеченные объекты текстуально отображаются в поле *Область*, причем взаимосвязанные объекты отображаются в пределах одного квадранта с дефисом между начальным и конечным объектом области (например, 12,13,14 -> 12-14).

На закладке *Создание* отображаются атрибуты создания снимка. Помимо того, указывается, кто из пользователей создал снимок.

Активировать снимок из серии (меню Видео)

Если Вы щелкнете по снимку в серии, то он будет показан в главном окне. Вы можете активировать предыдущий снимок, нажав в меню *Видео* пункт *Активировать следующий снимок*.

Маркировка снимка для сохранения

По нижнему краю снимков, находящихся в серии, Вы увидите окно флажка . Щелчком по этому полю, Вы можете выбрать снимок для сохранения  или отменить выбор .




Сохранены или переданы на монтажный стол будут только маркированные снимки .

Присвоить снимок

Снимкам в линейке снимков может быть присвоен тип объекта (номер зуба или вид

снимка) и другая информация.

Для указания типа объекта либо щелкните по символу ▼ на нижнем крае желаемого снимка в серии и выберите желаемый ввод из списка, либо выберите кнопку *Info* .

Управление ножным переключателем

В видеомодуле у Вас есть возможность управлять основными функциями при помощи **ножного переключателя**.

Через **меню конфигурирования: Конфигурация/Модуль/ Ножной переключатель** Вы можете присвоить **ножному переключателю** следующие функции:

Take	= выполнить снимок
Still / Live	= неподвижный кадр / прямая съемка
Full	= отображение полного кадра / нормальное отображение
Activate	= активировать и показать в главном окне следующий снимок в серии
Print	= распечатать активированный снимок

Управление кнопочными комбинациями

Важные функции Вы можете также выбирать при помощи клавиатуры. С ее помощью можно также управлять посредством наружных программ.

Нажмите ALT, чтобы активировать строку меню. Нажмите цифру, которая в имени меню с желаемой командой подчеркнута. Нажмите во введенном меню цифру, которая в имени желаемой команды подчеркнута.

Например:

Live	= ALT + 1 + 1
Still	= ALT + 1 + 2
Full	= ALT + 2 + 1
Activate	= ALT + 1 + 6
Print	= ALT + 2 + 4

