



Innehåll patientregister

Allmänt	3-1
Patientinfo	3-1
Funktioner	3-2
Registrera patient (meny patient).....	3-2
Avregistrera patient (meny patient).....	3-2
Gå till föregående patient.....	3-2
Gå till nästa patient.	3-2
Spara patient (meny patient).....	3-2
Skapa ny patient (meny patient)	3-2
Bearbeta patientdata (meny patient)	3-2
Ignorera ändringar (meny patient)	3-2
Radera patient (meny patient)	3-3
Registrera information (meny patient)	3-3
Patientbild	3-3
Kortläsare.....	3-4
Extra fält	3-4
Importera patient.....	3-4
Sök patient	3-5
Bildöversikt.....	3-6
Visa Bilder.....	3-6
Videobilder	3-6
Intraorala bilder	3-7
Extraorala bilder	3-7


Patientregister

Allmänt

I patientregistret kan patientdata registreras, ändras, raderas och väljas.

På registerkortet ser du all patientrelaterad data och en översikt över befintliga bilder.

Patientinfo

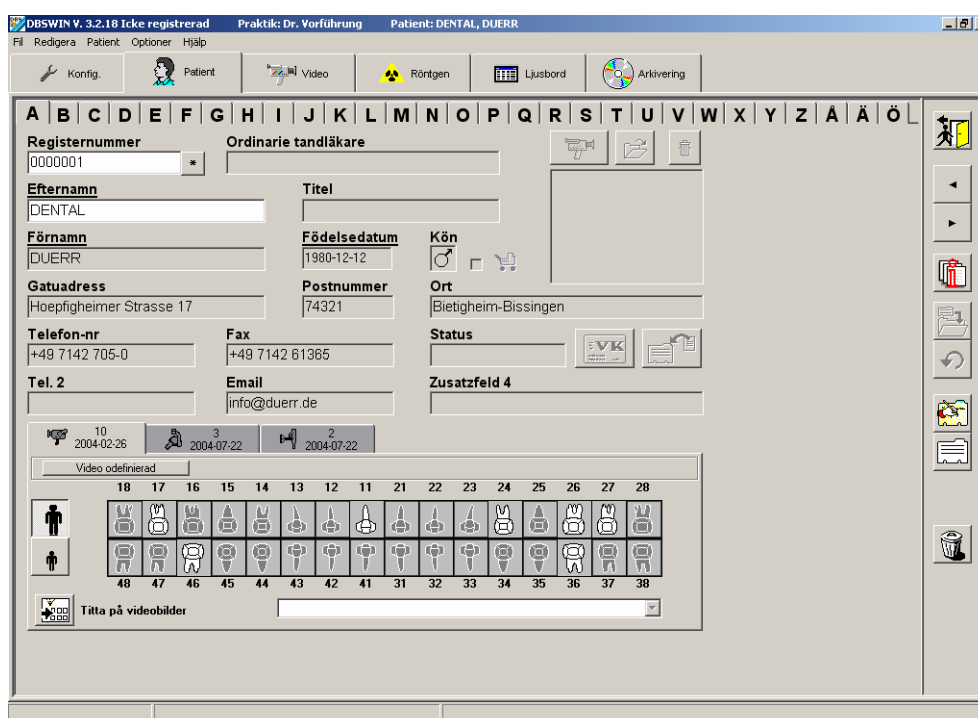

Funktioner

Registrera patient (meny patient)

Klicka på knappen för att registrera selekterad patient i DBSWIN och patientdata visas i statusraden. Indikeringen börjar blinka om en annan patient har selekterats, men ej registrerats. Alla funktioner kan nu utföras för selekterad patient (ta bilder, titta på bilder på ljusbordet etc.). Genom att klicka på den blinkande knappen i statusraden kan du sedan enkelt selektera den registrerade patienten igen.

Knappen *Patient registrera/avregistrera* skiftar då åter till avregistrera patient.

Selekteras och registreras en ny patient, så visas den nya patienten i statusraden.

Externt importerade patienter registreras alltid!

Avregistrera patient (meny patient)

Avregistrerar aktuell, registrerad patient och tömmer alla datafält.

Gå till föregående patient


Gå till nästa patient

Spara patient (meny patient)


Sparar gjorda inmatningar.

Skapa ny patient (meny patient)



Under Patientinfo klickar du på symbolen , för att skapa en ny patient.

Fyll i fälten. Spara patienten genom att klicka på . Fälten förnamn, efternamn och födelse-datum måste fyllas i. Obligatoriska fält med röd bakgrund har ej fyllts i eller är felaktigt ifyllda.

Du kan alltid avbryta eller ignorera registrering av data genom att klicka på symbolen .

Om du har anslutit en kortläsare för du in försäkringskortet i kortläsaren och klickar på , för att skapa patienten.

Bearbeta patientdata (meny patient)


Genom att klicka på  kan du ändra patientdata. Du sparar ändringarna genom att klicka på .

Ignorera ändringar (meny patient)

Lämnar bearbetningsmodus utan att spara inmatningarna.



Radera patient (meny patient)



För att radera en patient väljer du patienten i databanken och klickar på . Vald patient raderas nu i aktiv databank.


Om det finns bilder som hör till patienten i databanken, informeras du vid raderingen om att du inte kan radera patienten om det finns förvaringspliktiga röntgenbilder eller arkiverade bilder. I det fallet döljs patienten, dvs. patienten visas inte mer.

För att kunna välja en dold patient igen måste du markera *Visa dold patient* i *Konfiguration/Moduler/Patient/Kort:Patient*. Därefter visas även dolda patienter i söklistan (+ i spalten *Dold*). Attributet *Dold* återställs så snart en dold patient väljs. Därefter syns patienten och visas normalt igen!




Registrera information (meny patient)

Genom att klicka på  kan du visa tilläggsinformation som t. ex. allergier eller anmärkningar till varje patient och registrera eller ändra dem i bearbetningsmodus .

Bredvid knappen  visas alltid innehållet i den första textraden (a1) om kontrollrutan *Visa tilläggsinformation* har markerats i *Konfiguration/Moduler/Patient/Patient*.

Infofönster

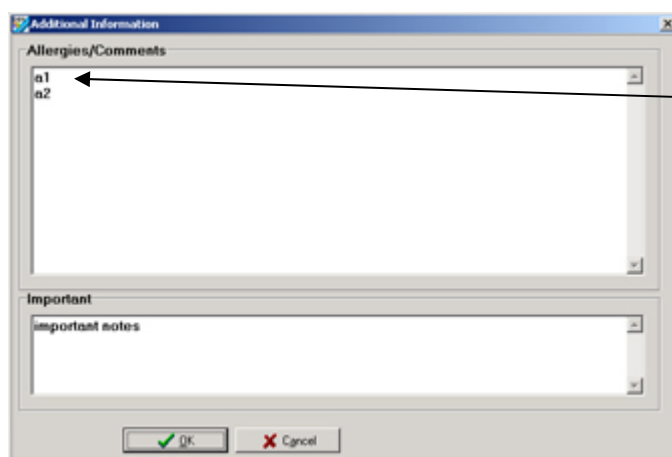

Visad tilläggsinformation
bredvid aktivitetsknappen



Patientbild

Bilden kan bara tas i bearbetningsmodus.

Den kan antingen tas direkt med en befintlig videokälla  eller läsas in från en befintlig bildfil  (BMP, JPEG, TIFF) eller raderas .



Kortläsare

Försäkringskortet används inte i alla länder. Därför går det att ta bort kortläsarknappen och fälten med försäkringsdata. Det kan du göra vid **Inställningar** för registerkort som görs i konfigurationen.

En extern kortläsare kan anslutas till en seriell port. Du kan också använda tangenter av typen 'Cherry 1501' för kortläsare. Rätt kortläsare måste alltid konfigureras en gång. För att göra det går du via optionsmenyn till konfigurationssidan och startar **Inställningar kortläsare**.

Externa kortläsare måste konfigureras så att de kommunicerar med datorn (en passande anslutningskabel behövs).

För **Cherry-tangenterna** måste av tillverkaren medlevererade drivrutiner installeras.

Även för **Cherry-kortläsartangenter** finns det en switch för val av modus. Den måste stå på Mode1. OBS! Omkopplingen blir först verksam efter nystart!

För ytterligare information, se handboken från tillverkaren.

Du kan inte använda kortläsaren för att ändra data på en befintlig patient.

I sökmodus:

Skjut in försäkringskortet och klicka på kortläsarknappen. Om patienten redan finns i databanken väljs patienten på detta sätt.

Om inte, kopplar systemet om till bearbetningsmodus och data som finns på kortet fylls i fälten. Du behöver bara trycka på Spara-knappen. Ny patient skapas.

Skapa ny patient:

Du kan skapa en ny patient med kortläsare genom att klicka på **Ny patient**, skjut in kortet och klicka på **kortläsarknappen**. Nu behöver du bara spara.

Extra fält

Förutom fördefinierade datafält finns fyra fritt definierbara fält som du kan använda enl. önskemål, t. ex. för att ange patientens faxnummer eller e-postadress.

Extra fält nummer 1 finns bredvid telefonnumret, de övriga ovanför bildöversikten.

För varje fält kan du bestämma överskrift och om det ska visas eller ej. Detta bestämmer du i **Egenskaper** till patientregistret som du kommer till genom att högerklicka med musen på valfritt ställe på registerkortet.



Importera patient

Med den här knappen kan du hämta patientdata från andra program, t. ex. praktikadministration (inställningar i **Konfiguration/ Moduler/ Patient**).

Genom att klicka på knappen med röd ram hämtas data och väljs (om patienten redan finns). Finns ingen patient med samma data, sker byte till "Skapa ny patient"-modus.

Om en patient med samma namn men med annat registernummer redan har sparats, sker byte till "Bearbeta patient"-modus.

För att överta ändringarna i databanken måste du alltid klicka på .

Sök patient

För att söka en patient i databanken, klickar du på fliken med patientens begynnelsebokstav. I sökfönstret visas nu alla patienter som börjar med denna bokstav. Nu kan du söka igenom listan och välja önskad patient. Om listan är lång kan du maximera sökandet genom att skriva in fler bokstäver i fältet **Söktext**. Starta sökfunktionen genom att klicka på **Sök**. I sökfältet kan du även välja registernumret som sökkriterium för att även söka patienten via detta numret.

Du kan också skriva in det sökta namnet i fältet **Efternamn** eller önskat nummer i fältet kortnummer i Patientinfo. Du startar sökningen genom att trycka på returtangenten **Enter**.

Om du klickar på fliken  visas samtliga patienter.

OBS! Registernumret består av maximalt 15 tecken som läses från vänster till höger! Exempel: Med den sökta teckensekvensen 001T-A0 får du en resultatlista 001T-A0*, varvid * är ett valfritt tecken!

Bildöversikt

På registerkortets nedre del ser du aktivitetsfältet "Bildöversikt". Förutom att det visualiserar bilder som tagits på aktuell patient, kan du snabbt hämta bilder på bestämda tänder eller en bestämd bildtyp till ljusbordet.


Uppe på flikarna finns bredvid en symbol för bildtypen även symbolerna för befintliga bilder av denna bildtyp. Därunder visas datum för senast tagna bild av denna typ. Genom att välja flik visas respektive registerkort.

Antalet odefinierade bilder på aktuell bildtyp visas.


Befintliga bilder på enstaka tänder markeras genom att tanden framhävs med färg.

Det finns en sida för videobilder, en för intraorala bilder och en för extraorala bilder.

Visa bilder

Varje sida i bildöversikten har en knapp  med vilken du kan gå till ljusbordet. Där kan du i bildvalsboxens temporära bildminne titta på alla bilder med denna bildtyp (alla videobilder, alla intraorala bilder eller alla extraorala bilder). Knappen fungerar bara om det finns bilder med denna bildtyp på patienten.


Genom att klicka på *Xray UNDEF* eller *Video UNDEF* kan du gå till ljusbordet och alla odefinierade bilder av aktuell bildtyp (video, röntgen) visas i bildvalsboxens temporära bildminne för urval. Fältet fungerar bara om det finns bilder med denna bildobjektstyp på patienten.

På sidorna för video- och intraorala bilder, finns vardera ett tandschema i vilket tänder, där bilder finns, framhävs med färg. Ytterligare befintliga bildobjektstyper visas i en urvalslista . Urvalslistan fungerar bara om det finns bilder med denna bildobjektstyp på patienten.

På sidan för extraorala bilder visas alla extraorala bilder i tre urvalslistor.


Genom att klicka på en tand eller en inmatning i en urvalslista går man till ljusbordet där alla bilder på denna objekttyp visas i bildvalsboxens temporära bildminne för urval.

Videobilder

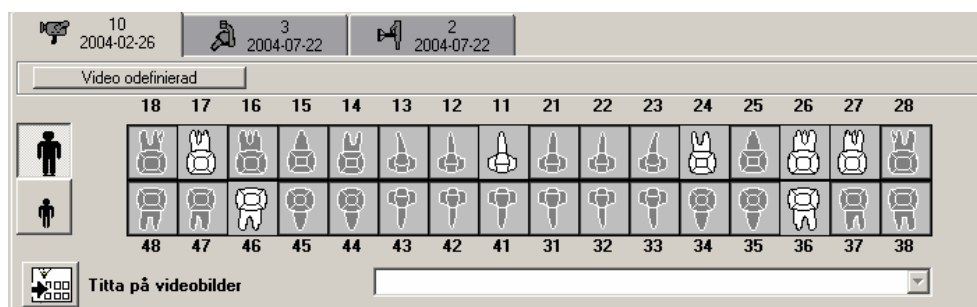


På den här sidan ser du ett tandschema för översikt över alla patientens videobilder på enstaka tänder. Tänder, där bilder finns, framhävs med färg.

Intraorala bilder

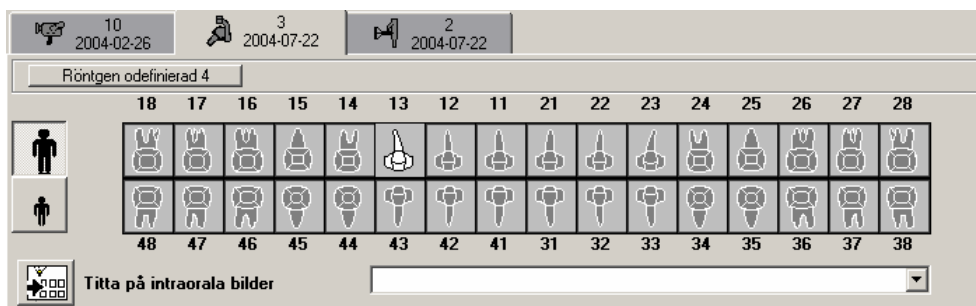

På den här sidan ser du ett **tandschema för översikt** över alla patientens **intraorala bilder** på **enstaka tänder**. Tänder, där bilder finns, framhävs med färg.

Extraorala bilder

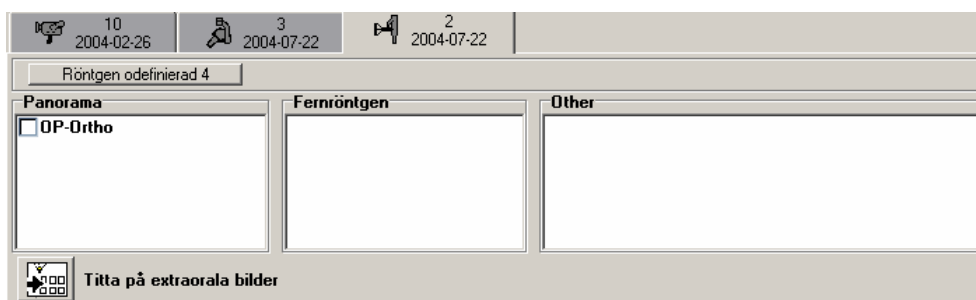

Alla befintliga och tilldelade bildobjektstyper visas i de tre listrutorna.